

VS-800

Vitalfunktionsmonitor

Kurzbedienungsanleitung



Handelspartner:

Acutronic Medical Systems GmbH
Sterneckstr. 55/5
5020 Salzburg
Austria

Tel.: +43 – 662 – 890397
Fax: +43 – 662 – 890397 – 15
e-Mail: Office@Acutronic-MS.at
Web: www.acutronic-ms.at


ACUTRONIC
Medical Systems GmbH

Kurzbedienungsanleitung:

	Ein / Aus / Stand-By - 1 x Drücken = Stand-By - 1 x für vier (4) Sekunden = Ausschalten
	Patienten-INFO = auswählen des Patienten - Erwachsener - Kind - Neugeborenes Patienten-ID eingeben (wahlweise)
	Menü-Taste zum Wechseln zwischen - System-Einstellungen - Trendübersicht
	Alarmer einstellen
	Monitor-Anzeige drücken um zwischen - Kurvendarstellung SpO2 und - Trendaneige NiBP zu wechseln
	Drucker Start / Stop
	Manuelle NiBP-Messung Start / Stop Jederzeit - auch zwischen Intervallen möglich
	Alarm Stummschaltung - Einmal drücken für 2 Minuten - Länger als zwei (2) Sekunden drücken um akustische Alarmer generell stumm zu schalten
	- Menüpunkt auswählen (nach oben) - Gewählten Menüpunkt oder Einstellung bestätigen - Menüpunkt auswählen (nach unten)



Geräte Vorderseite:

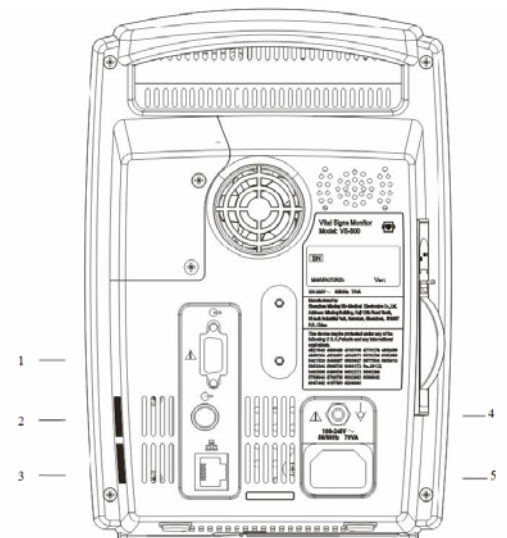

Geräte Rückseite:

1. RS-232-Stecker
2. Schwesterruf
3. Netzwerkverbindung
4. Potentialausgleich
5. Strom-Anschluss